

INSTRUÇÕES DE USO

TUBIFAST® COM 2-WAY STRETCH

Nome técnico: Bandagem

Nome comercial: Tubifast® com 2-Way Stretch

Verifique no rótulo do produto a versão da instrução de uso correspondente. Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo do produto.

**Obtenha a Instrução de Uso através do endereço eletrônico:
<http://www.molnlycke.com.br/instrucoesdeuso/>.**

**O formato impresso também poderá ser adquirido através do telefone:
(90 11) 3016-8900 (SAC) sem custo adicional.**

“Produto médico não estéril”

ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES. OBSERVE OS AVISOS E PRECAUÇÕES APRESENTADOS, PARA ASSEGURAR A EFICIENTE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.

APRESENTAÇÕES COMERCIAIS DO PRODUTO MÉDICO

As embalagens unitárias do produto médico estão acondicionadas em caixa de papelão nas seguintes quantidades:

| Modelo Comercial | Tipo de produto | Tamanho nominal (cm x m) | Variação Largura em repouso (cm) | Variação Largura esticada (cm) | Variação Comprimento (m) |
|-------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| 2434 | Tubifast® com 2-Way Stretch - Vermelho | 3,5 x 10 | 3 - 4,5 | 14 - 18 | 10 - 10,6 |
| 2436 | Tubifast® com 2-Way Stretch - Verde | 5 x 10 | 5,0 - 6,5 | 19,5 - 24,5 | 10 - 10,6 |
| 2438 | Tubifast® com 2-Way Stretch - Azul | 7,5 x 10 | 7,5 - 9,5 | 30 - 36 | 10 - 10,6 |
| 2440 | Tubifast® com 2-Way Stretch - Amarelo | 10,75 x 10 | 12 - 13,5 | 41 - 49 | 10 - 10,6 |
| 2444 | Tubifast® com 2-Way Stretch - Roxo | 20 x 10 | 19 - 23 | 76 - 86 | 10 - 10,6 |

DESCRIÇÃO DO PRODUTO E MODO DE AÇÃO

O produto mantém curativos no lugar, sem constrição ou compressão. Sua elasticidade leve permite que os pacientes possuam completa liberdade de movimento. O tecido de trama aberta e leve permite que o ar circule sobre a pele, ajudando na prevenção de maceração.

Composição:

Tubifast® com 2-Way Stretch é composto por viscose, elastano e nylon (poliamida).

INDICAÇÃO DE USO

Tubifast® com 2-Way Stretch é uma bandagem de malha lisa, indicado para manter/reter curativos no lugar em qualquer parte do corpo como parte da técnica de enfaixamento (seca e úmida) e como uma malha tubular.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Selecionar o tamanho correto de Tubifast® e cortar o comprimento, se necessário.
2. Abra a bandagem e estique sobre a área afetada.

Utilização individual. Múltiplos usos.

Os produtos são laváveis para reutilização, desde que não tenham sido sujos com fluidos corporais.



Máxima temperatura de lavagem 60°C. Secagem em tambor rotativo é permitida em temperatura mínima. Não utilizar alvejante. Não passar a ferro. Não limpar a seco.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Mantenha limpo.
- Evite aproximar de chamas ou de outras fontes de ignição, especialmente quando utilizado juntamente com produtos à base de parafina.
- Em caso de sujidades no Tubifast® devido a fluidos corporais, descarte-o adequadamente e faça a devida substituição.
- Em casos de piora das condições, interrompa o uso e procure orientação médica.
- Se algum incidente sério ocorrer, relacionado ao uso do Tubifast®, este deve ser reportado a Mölnlycke Health Care.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Deve ser armazenado em condições secas e temperatura entre 0° e 35°C.

Transportar o produto em sua embalagem original.

DESCARTE

Deve ser seguido um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS - para o manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme as diretrizes da RDC 306, de 07/12/2004 ou suas atualizações.



VALIDADE: Vide embalagem (05 anos)

NÚMERO ANVISA: 80733280009

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Kaynara Cordeiro – CRF/SP 78229

E-MAIL: tecnovigilanciabr@molnycke.com.br

IMPORTADOR:

MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

Av. Portugal, 1100 – Parte C43 – Itapevi, SP

CEP: 06696-060

CNPJ: 12.600.168/0001-17

FABRICANTE LEGAL:

Molnlycke Health Care AB, Gamlestadsvangen 3C, PO Box 13080, Gotenborg, SE-402 52 – Suécia

Fabricado no Reino Unido