

## INSTRUÇÕES DE USO

### Mepitac®

**Nome Técnico:** Esparadrapos e Fitas Adesivas

**Nome Comercial:** Mepitac®

**Modelos:** Mepitac® 2cm x 3m, Mepitac® 4cm x 1,5m

**Verifique no rótulo do produto a versão da instrução de uso correspondente. Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo do produto.**

**Obtenha a Instrução de Uso através do endereço eletrônico:**  
<http://www.molnlycke.com.br/instrucoesdeuso/>.

**O formato impresso também poderá ser adquirido através do telefone:**  
**(90 11) 3016-8900 (SAC) sem custo adicional.**

“Produto médico não estéril”

“Fabricante recomenda uso único”

**ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES. OBSERVE OS AVISOS E PRECAUÇÕES APRESENTADOS PARA ASSEGURAR A EFICIENTE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.**

### APRESENTAÇÕES COMERCIAIS DO PRODUTO MÉDICO

As embalagens unitárias do produto médico estão acondicionadas em caixa de papelão nas seguintes quantidades:

Código do Produto	Produto e Dimensão	Quantidade por embalagem secundária
298300	MEPITAC® 2cm x 3m	1
298400	MEPITAC® 4cm x 1.5m	1

## **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

O Mepitac® é uma fita adesiva muito adaptável, fácil de aplicar e de remover. O Mepitac® é adequado para pacientes que requerem aplicação e remoção repetidas, pois oferece uma remoção suave à pele e pelos do corpo, e fornece uma fixação segura.

Se for necessário inspeção ou reposicionamento, o Mepitac® pode ser levantado e reaplicado. O Mepitac® não deixa resíduos.

O Mepitac® é resistente a água.

## **Composição**

- Uma camada de contato Safetac®\*
- Uma camada de malha adaptável
- Um filme de poliuretano respirável e a prova de água.

Componentes do material: Filme de poliuretano, adesivo acrílico, malha de poliéster/poliamida, camada de silicone adesivo e filme de polietileno.

\*Safetac® é uma tecnologia de adesividade de silicone única, que minimiza a dor nos pacientes e o trauma à pele no momento da remoção do curativo.

## **INDICAÇÃO DE USO**

O Mepitac® é indicado para a fixação de dispositivos médicos como drenos, tubos, sondas, eletrodos, cânulas IV e curativos. Além disso o Mepitac® oferece uma proteção suave à pele quando utilizado sob dispositivos como tubos.

## **MODO DE UTILIZAÇÃO**

O Mepitac® pode ser utilizado por pessoa leiga sob supervisão de profissional de saúde.

1. Assegure-se que a pele esteja limpa, seca e sem creme/pomada;
2. Corte o comprimento desejado da fita utilizando uma tesoura;
3. Retire o papel protetor e aplique o Mepitac® sem esticar;
4. Se for necessário inspecionar ou re-inspecionar a área, o Mepitac® pode ser retirado e depois reaplicado.

Troque o Mepitac® quando suas propriedades adesivas não forem mais suficiente.



## **PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS**

- O Mepitac® não se destina à fixação de dispositivos que salvam e sustentam vidas.
- Não reutilizar. Se reutilizado, o desempenho do produto poderá deteriorar-se e poderá ocorrer contaminação cruzada.
- As propriedades adesivas do Mepitac® podem diminuir quando este for utilizado em condições úmidas tais como incubadoras ou em pacientes com febre ou que transpirem muito.
- Se algum incidente sério ocorrer, relacionado ao Mepitac®, este deve ser reportado a Molnlycke Health Care.

## **CONTRA-INDICAÇÕES**

- Não use o Mepitac® em pacientes ou usuários com hipersensibilidade conhecida aos materiais ou componentes do produto.

## **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

Armazenar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).

Transportar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).

## **DESCARTE**

Deve ser seguido um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS - para o manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme as diretrizes da RDC 306, de 07/12/2004 ou suas atualizações.

**VALIDADE:** Vide embalagem (03 anos)

**REGISTRO ANVISA:** 80733280004

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Kaynara Cordeiro – CRF/SP 78229

**E-MAIL:** tecnovigilanciabr@molnlycke.com

## **IMPORTADOR:**

MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Av. Portugal, nº 1100, Parte C-43, Bairro Itaqui, ITAPEVI / SP. CEP: 06696-060



**CNPJ:** 12.600.168/0001-17

**FABRICANTE LEGAL:**

Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvägen 3C, PO Box 13080, Gotenborg, SE-402  
52 – Suécia.

Fabricado na Finlândia