

## **INSTRUÇÕES DE USO**

### **TUBIFAST® GARMENTS**

**Nome técnico:** Bandagem

**Nome comercial:** Tubifast® Garments

**Verifique no rótulo do produto a versão da instrução de uso correspondente. Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo do produto.**

**Obtenha a Instrução de Uso através do endereço eletrônico:  
<http://www.molnlycke.com.br/instrucoesdeuso/>.**

**O formato impresso também poderá ser adquirido através do telefone:  
(90 11) 3016-8900 (SAC) sem custo adicional.**

“Não utilizar se a embalagem estiver danificada”

“Utilização individual, múltiplos usos”

**ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES. OBSERVE OS AVISOS E PRECAUÇÕES APRESENTADOS, PARA ASSEGURAR A EFICIENTE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.**

#### **APRESENTAÇÕES COMERCIAIS DO PRODUTO MÉDICO**

O produto é acondicionado em caixa de papel cartonado nas seguintes dimensões e quantidades:

<b>Código do Produto</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Quantidade por embalagem secundária</b>
5920	Tubifast® Luvas	M/G Adulto	06
5921	Tubifast® Luvas	P/M Adulto - M/G Infantil	06
5922	Tubifast® Luvas	XP Infantil	06
5923	Tubifast® Luvas	P Infantil	06
992007	Tubifast® Veste	6-24 meses	06
992008	Tubifast® Veste	2-5 anos	06
992009	Tubifast® Veste	5-8 anos	06
992010	Tubifast® Veste	8-11 anos	06
992011	Tubifast® Veste	11-14 anos	06
992012	Tubifast® Legging	6-24 meses	06
992013	Tubifast® Legging	2-5 anos	06
992014	Tubifast® Legging	5-8 anos	06
992015	Tubifast® Legging	8-11 anos	06
992016	Tubifast® Legging	11-14 anos	06
992017	Tubifast® Meias	Único	06

## **DESCRIÇÃO E MODO DE AÇÃO**

Tubifast® Garments possui 2-Way Stretch Technology e é composto de fibras de viscose, nylon e elastano para fornecer uma leve elasticidade.

O produto mantém/retém os curativos no lugar, sem constrição ou compressão. Sua elasticidade leve permite que os pacientes possuam completa liberdade de movimento. O tecido de trama aberta e leve permite que o ar circule sobre a pele, ajudando na prevenção de maceração.

Tubifast® Garments são roupas leves: luvas, vestes, meias e leggings em uma variedade de tamanhos (veja as tabelas acima). Tubifast® Garments são construídos com painéis tubulares de malha elástica de duas vias, unidas com costuras planas e destinam-se a utilização

individual, múltiplos usos. Os produtos são laváveis para reutilização, desde que não sejam sujos com fluidos corporais.

### **INDICAÇÃO DE USO**

O Tubifast® Garments é indicado para manter/reter curativos no lugar, como parte da técnica de enfaixamento (seca e úmida).


### **COMPOSIÇÃO**

Fibras feitas em viscose, nylon (poliamida) e elastano.

### **INSTRUÇÕES DE USO**

Recomenda-se que o Tubifast® Garments seja utilizado de acordo com as dimensões e com a idade, conforme tabela abaixo.

Utilização individual, múltiplos usos.

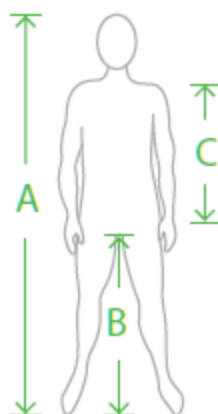

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
6-24 meses	74 – 86 cm	28 – 34 cm	25 – 29,5 cm
2-5 anos	86 – 110 cm	34 – 47 cm	29,5 – 35,5 cm
5-8 anos	110 – 128 cm	47 – 58 cm	35,5 – 42 cm
8-11 anos	128 – 146 cm	58 – 68 cm	42 – 49 cm
11-14 anos	146 – 164 cm	68 – 77 cm	49- 57,5 cm

Os produtos são laváveis para reutilização, desde que não tenham sido sujos com fluidos corporais.



Máxima temperatura de lavagem de 60°C. Secagem em tambor rotativo é permitida em temperatura mínima. Não utilizar alvejante. Não passar a ferro. Não limpar a seco.

### **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

- Mantenha limpo.
- Evite aproximar de chamas ou de outras fontes de ignição, especialmente quando utilizado juntamente com produtos à base de parafina.
- Em caso de sujidades no Tubifast® Garments devido a fluidos corporais, descarte-o adequadamente e faça a devida substituição.
- Em casos de piora das condições, interrompa o uso e procure orientação médica.
- Se algum incidente sério ocorrer, relacionado ao uso do Tubifast® Garments, este deve ser reportado a Mölnlycke Health Care.

### **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Deve ser armazenado em condições secas e temperatura até 35°C.

### **DESCARTE**

Deve ser seguido um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS - para o manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme as diretrizes da RDC 306, de 07/12/2004 ou suas atualizações.

**VALIDADE:** Vide embalagem (05 anos)

**NÚMERO ANVISA:** 80733280026

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Kaynara Cordeiro – CRF/SP 78229

**E-MAIL:** tecnovigilanciabr@molnlycke.com.br



**IMPORTADOR:**

MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

Av. Portugal, 1100 – Parte C43 – Itapevi, SP

**CEP:** 06696-060

**CNPJ:** 12.600.168/0001-17

**FABRICANTE LEGAL:** Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvagen 3C, PO Box 13080,  
Gotenborg, SE-402 52 – Suécia

Fabricado no Reino Unido