

## INSTRUÇÕES DE USO

### Melgisorb® Plus

**Nome Técnico:** Curativo

**Nome Comercial:** Melgisorb® Plus

**Modelos:** 252000 - Melgisorb Plus 5x5 cm; 252200 - Melgisorb Plus 10x10 cm; 252500 - Melgisorb Plus 10x20 cm; 253500 - Melgisorb Plus, Cavity 3x45 cm

**Verifique no rótulo do produto a versão da instrução de uso correspondente. Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo do produto.**

**Obtenha a Instrução de Uso através do endereço eletrônico: <http://www.molnlycke.com.br/instrucoesdeuso/>.**

**O formato impresso também poderá ser adquirido através do telefone:**

**(90 11) 3016-8900 (SAC) sem custo adicional.**

“Produto médico estéril”

“Produto médico esterilizado por Radiação gama”

“Fabricante recomenda uso único”

**ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES.**

### **Descrição do Produto/Composição**

O Melgisorb Plus é um curativo macio, altamente absorvente, estéril e de uso único, fabricado a partir de fibras de alginato de sódio e cálcio.

O Melgisorb Plus está disponível nos modelos de curativo em placa e fita para cavidades (Cavity).

## APRESENTAÇÕES COMERCIAIS DO PRODUTO MÉDICO

Código do Produto	Produto e Dimensão (cmxcm)
252000	Melgisorb Plus 5x5
252200	Melgisorb Plus 10x10
252500	Melgisorb Plus 10x20
253500	Melgisorb Plus, Cavity 3x45

### Modo de ação

O alginato é hidrófilo e absorve o exsudado da ferida. Ao absorver o exsudado que contem íons de sódio, as fibras de alginato sólidas rapidamente formam um gel úmido, o qual cria um ambiente úmido benéfico para a cicatrização da ferida.

Quando em contato com o sangue, o Melgisorb Plus acelera a agregação plaquetária, melhorando o processo hemostático. O gel pode ser facilmente removido do frágil leito da ferida através de irrigação com solução salina a 0.9%.

### Indicação de Uso

O Melgisorb Plus destina-se a ser utilizado num amplo conjunto de feridas com exsudado moderado a intenso, infectadas ou não infectadas, por exemplo: feridas por pressão, úlceras venosas e arteriais, úlceras diabéticas, feridas pós-operatórias, lesões dérmicas e outras feridas externas provocadas por traumas.

### Instruções de utilização

O Melgisorb Plus pode ser utilizado por pessoa leiga sob supervisão de profissional de saúde.



Figura A. Ilustração gráfica da aplicação do Melgisorb Plus em curativo em placa.

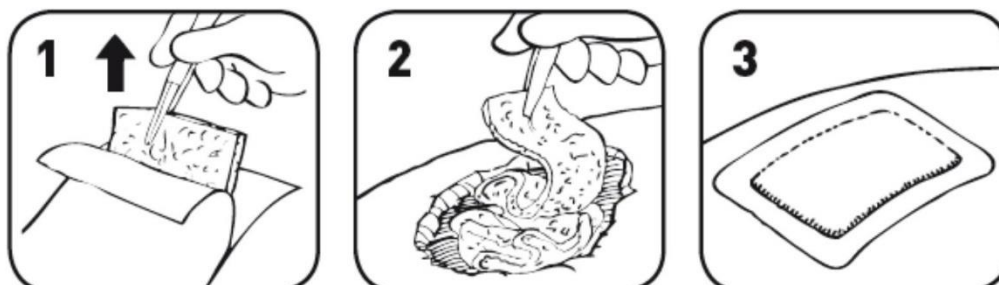


Figura B. Ilustração gráfica da aplicação do Melgisorb Plus em curativo em fita para cavidades (Cavity).

#### Aplicação:

1. Limpe/enxágue a ferida com solução salina a 0.9% ou outra solução apropriada.
2. Seque a pele circundante saudável e, se necessário, proteja com um creme/unguento resistente à água.
3. Aplique o produto Melgisorb Plus seco sobre o leito da ferida úmida.

Para feridas rasas/pouco profundas: escolha o tamanho certo de curativo em placa para cobrir a ferida inteira.

Para feridas profundas e cavidades: corte o comprimento apropriado do curativo em fita para cavidade e encha a ferida sem comprimir.

4. Cubra com um curativo secundário apropriado. A escolha depende do nível de exsudado. Fixe com um curativo adesivo ou ligadura, conforme for apropriado.
5. É possível usar terapia de compressão em conjunto com Melgisorb Plus.

#### Mudança e remoção do curativo:

- O Melgisorb Plus pode ser deixado no local durante vários dias. A troca do curativo deve ser realizada antes que o curativo atinja a saturação total ou conforme indicado pela prática clínica.
- Retire o Melgisorb Plus limpando/enxaguando suavemente com solução salina a 0.9% ou outra solução apropriada. Qualquer Melgisorb Plus não gelificado ficará úmido em contato com a solução salina.



### **Precauções, Advertências e Contra-Indicações**

Melgisorb Plus não está indicado para feridas secas, queimaduras de terceiro grau e implantes cirúrgicos.

Não utilize o Melgisorb Plus em pacientes e/ou usuários com conhecida hipersensibilidade aos materiais/componentes do produto.

Em caso de suspeita de infecção, siga as rotinas locais recomendadas pelos profissionais de saúde.

O Melgisorb Plus não deve ser utilizado em feridas com intenso sangramento.

Não reutilize. Se reutilizado, o desempenho do produto poderá deteriorar-se e poderá ocorrer contaminação cruzada.

Produto Estéril. Não utilizar se a embalagem interior estiver danificada ou tiver sido aberta antes da utilização. Não reesterilizar.

Se algum incidente sério ocorrer em relação ao uso do Melgisorb Plus deve ser reportado à Mölnlycke.

### **Armazenamento e Transporte**

Melgisorb Plus deve ser armazenado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).

### **DESCARTE**

Deve ser seguido um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS - para o manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme as diretrizes da RDC 222 de 2018 ou suas atualizações.

**VALIDADE:** Vide embalagem (36 meses)

**REGISTRO ANVISA:** 80733280018

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Laís Santos Nogueira – CRF/SP 95064

### **IMPORTADOR:**

MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

Av. Portugal, 1100 – Parte C43 – Itapevi, SP

CEP: 06696-060

CNPJ: 12.600.168/0001-17

EMAIL: [tecnovigilanciabr@molnlycke.com](mailto:tecnovigilanciabr@molnlycke.com)



**Fabricante Legal:**

Molnlycke Health Care AB, Gamlestadsvagen 3C, PO Box 13080, Gotenborg, SE-402  
52 - Suécia

Fabricado na China