

INSTRUÇÕES DE USO

MESALT

Nome técnico: Curativo

Nome comercial: Mesalt

Verifique no rótulo do produto a versão da instrução de uso correspondente. Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo do produto.

Obtenha a Instrução de Uso através do endereço eletrônico: <http://www.molnlycke.com.br/instrucoesdeuso/>.

O formato impresso também poderá ser adquirido através do telefone: (90 11) 3016-8900 (SAC) sem custo adicional.

“Produto médico estéril”

“Produto médico esterilizado por vapor”

“Fabricante recomenda uso único”

“Não utilizar se a embalagem estiver danificada”

ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES. OBSERVE OS AVISOS E PRECAUÇÕES APRESENTADOS, PARA ASSEGURAR A EFICIENTE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.

APRESENTAÇÕES COMERCIAIS DO PRODUTO MÉDICO

As embalagens unitárias do produto médico estão acondicionadas em caixa de papelão nas seguintes quantidades:

| Código do Produto | Descrição | Dimensões (cm x cm) | Quantidade por embalagem secundária |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| 285299 | Mesalt Ribbon 2x100 cm - US | 2x100 | 10 |

| | | | |
|--------|------------------------|---------|----|
| 285280 | Mesalt Ribbon 2x100 cm | 2x100 | 10 |
| 285580 | Mesalt 5x5 cm | 5x5 | 30 |
| 285780 | Mesalt 7,5x7,5 cm | 7,5x7,5 | 30 |
| 286080 | Mesalt 10x10 cm | 10x10 | 30 |
| 286099 | Mesalt 10x10 cm - US | 10x10 | 30 |

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Mesalt® consiste num material não tecido macio de visco/poliéster impregnado com cloreto de sódio. Mesalt® absorve o exsudado de ferida e liberta o cloreto de sódio. Mesalt® torna-se hipertônico e, por conseguinte, o exsudato, as bactérias e o material necrótico são absorvidos pelo curativo, facilitando o processo de cicatrização de feridas.

Mesalt contém 20% em peso de cloreto de sódio.


INDICAÇÃO DE USO

Mesalt destina-se ao tratamento de feridas não infectadas/infectadas com um nível de exsudato moderado a elevado, tais como úlceras por pressão, úlceras nos pés e tratamento de feridas profundas, por exemplo feridas de cavidade e fístulas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Mesalt®

5 x 5 cm • 7.5 x 7.5 cm • 10 x 10 cm

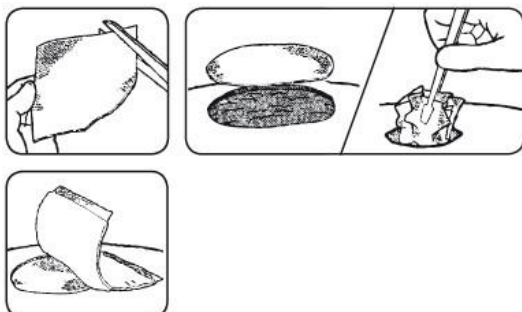

Mesalt®
2 x 100 cm



Aplicação:

1. Limpar a área da ferida e desbridar qualquer excesso de tecido necrótico ou escaras.
2. Secar a pele circundante, mas não secar a superfície da ferida.
3. Sempre que clinicamente indicado, pode ser utilizado um creme resistente à água ou unguento na pele circundante.
4. Escolher o tamanho do curativo Mesalt adequado. Para feridas com pouca profundidade, não permitir que Mesalt se sobreponha aos contornos da ferida. Para feridas profundas, encher a ferida soltamente.
5. Aplicar Mesalt seco na ferida.
6. Dependendo do nível de exsudado, cobrir com um segundo curativo adequado.
7. Sempre que clinicamente indicado, pode ser utilizada terapia de compressão conjuntamente com Mesalt.

Mesalt destina-se a uma utilização repetida de curto prazo.

Testes pré-clínicos suportam a sua utilização durante até 30 dias.

FREQUÊNCIA DE MUDANÇA

Mesalt deve ser trocado quando saturado, geralmente uma vez por dia, ou de acordo com a prática clínica. Se a condição da ferida se deteriorar, interrompa o uso e consulte um profissional de saúde.

PRECAUÇÕES

- Mesalt não deve ser usado em paciente com alergia conhecida ao curativo ou seus componentes.
- Mesalt não deve ser usado em feridas secas.
- Mesalt não deve entrar em contato direto com osso ou tendão exposto.
- As feridas infectadas devem ser avaliadas regularmente e receber o tratamento adequado.

Não reutilize. Se reutilizado o desempenho do produto pode deteriorar-se e a contaminação cruzada pode ocorrer.

Estéril. Não use se a embalagem interna estiver danificada ou aberta antes do uso.

Não re-esterilizar.

Se o produto for utilizado após a data de validade, as propriedades do produto não podem ser garantidas.

CONTRAINDICAÇÕES

- Mesalt não é deve ser utilizado em pacientes com alergias conhecidas ao curativo ou a seus componentes.
- Não reutilizar. Se reutilizado, o desempenho do produto poderá deteriorar-se e poderá ocorrer contaminação cruzada.

ARMAZENAMENTO

Mesalt deve ser armazenado em condições secas (abaixo de 60% UR) e temperaturas abaixo de 25°C (77°F).

PRAZO DE VALIDADE

Consulte a embalagem do produto para se informar sobre o prazo de validade do produto. Não use o produto para além do respectivo prazo de validade indicado na embalagem.

Esterilizado por vapor.

DESCARTE

Deve ser seguido um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS - para o manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme as diretrizes da RDC 222 de 2018 ou suas atualizações.

VALIDADE: Vide embalagem (36 meses)

REGISTRO ANVISA: 80733280017

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Laís Santos Nogueira – CRF/SP 95064

E-mail: tecnovigilanciabr@molnlycke.com



Importador:

Mölnlycke Health Care Venda de Produtos Médicos Ltda
Avenida Portugal, nº 1100, parte C-43, Itaqui, Itapevi – SP
CEP:06696-060
CNPJ: 12.600.168/0001-17

Fabricante Legal:

Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvagen 3C, PO Box 13080, Gotenborg, Suécia
SE-402 52

Fabricado na Finlândia